

Umgang mit Vaporisator zur desinfizierenden Aufbereitung von Material für Inhalation und Mundpflege

**Vor dem Hantieren mit Inhalatoren und ähnlichem Material
Händedesinfektion durchführen!**

Es ist angebracht, Mundmasken und Verneblerteile mindestens 1x täglich und nach Patientenwechsel zu desinfizieren. Zwischen den Inhalationen nach Benutzen mit warmen Wasser spülen, trocknen, staubsicher aufbewahren.

Sprayflaschen für die **Mundpflege mind. alle 12 Stunden** aufbereiten!

Aufbereitung im Vaporisator:

1. **Abspülen** von benutzten Mundstücken, auseinander geschraubten Verneblerteilen und Sprayflaschen (ohne Sprühventil) **manuell** mit klarem Wasser.
2. Die gespülten Ansätze werden im VAPORISATOR mit 90 ml Wasser desinfiziert. Dazu die abgespülten Teile in den VAPORISATOR geben.
3. Gerät anstellen und Schild mit Dauer dazulegen (15 min).
4. Vor dem Herausnehmen der Artikel **Hände desinfizieren**.
5. Da die Artikel nach der Desinfektion feucht sind, auf ein frisches sauberes Abtrockentuch **zum Trocknen** stellen; noch in der gleichen Dienstzeit die jeweils **passenden Teile für ein Gerät** in ein **frisches Küchen-Abtrockenhandtuch** einschlagen und trocken(!) aufbewahren.
6. Den **VAPORISATOR** nach Benutzung mit 70 % Alkohol innen auswischen und Einsatzkörbe entsprechend Markierung einsetzen.
7. **Kompressorgehäuse** mit sauberem frischen Lappen und Alkohol 70 % desinfizieren.