

Dosiertabelle Endoskopie für Sekusept aktiv Pulver

100 g Pulver = 150 ml

1 Dosierlöffel = 20 g Pulver = 30 ml

1 Dosierbecher = 100 g Pulver = 150 ml

Liter Lösung	Konzentration der Anwendungslösung	
	1%	2%
2 Liter	30 ml	60 ml
4 Liter	60 ml	120 ml
8 Liter	120 ml	240 ml
10 Liter	150 ml	300 ml
20 Liter	300 ml	600 ml
30 Liter	450 ml	900 ml

Anwendungshinweise:

Wasser vorlegen. Dem Wasservolumen entsprechende Pulvermenge mit Dosierbecher/-löffel einstreuen.
 Mehrmals kurz umrühren. Nach 15 min. ist die Lösung einsatzbereit. Die Lösung ist arbeitstäglich zu wechseln.

- zur **Vorreinigung des Endoskops im Untersuchungsraum** (Vorreinigung und Spülen) mit 1 % - Lösung
- zur **Bürstenreinigung der Endoskopkanäle** mit 1 % - Lösung
- zur **Ultraschallreinigung und –desinfektion** von Zubehör in 2 % - Lösung