

## **5. Arbeitsanweisungen zur Verpackung und Sterilisation von Medizinprodukten**

### **5.1 Allgemeine Erläuterungen und Anweisungen zur Verpackung**

- Korrekte Verpackung für das entsprechende Sterilgut wählen: überwiegend Klarsichtverpackungen. Die Verpackung sollte so klein wie möglich, aber so groß wie nötig sein, um das Material problemlos entnehmen zu können. Sie darf weder von außen noch von innen durchstoßen werden oder einreißen.
- Sterilgut immer vor dem Verpacken trocknen.
- Sterilgut ausreichend kennzeichnen (mit Etikettierzange)
- Inhalt, Datum der Verpackung/Sterilisationsdatum, Ablaufdatum, Sterilisationsverfahren (ergibt sich aus Verpackungsindikator), Name des berechtigten Verpackers
- Bei Überschreiten des Verfalldatums Sterilgut neu aufbereiten, verpacken und sterilisieren.