

6.1 Lagerung der Endoskope

Die vollständige Trocknung der Endoskope ist, konstruktiv bedingt, problematisch. Liegende Lagerung begünstigt die Stagnation der Restfeuchtigkeit, daher wird die hängende Lagerung in geschlossenen Schränken praktiziert. An jedem aufbereiteten Endoskop ist ein Aufbereitungsetikett befestigt, das bei Benutzung in die Patientenakte geklebt wird.

Lagerung des Zubehörs

Es wird geeignete Sterilgutverpackung verwendet. Sämtliches Sterilgut wird staubgeschützt in Schränken gelagert. Die Lagerfristen werden 3monatlich kontrolliert. Vor Nutzung von Zubehörmaterial muss die Sterilgutverpackung, Foliennaht und der Behandlungsindikator überprüft werden.

Lagerung industriell verpackter Medicalprodukte

Die Vorratshaltung von industriell verpackten Medicalprodukten erfolgt bedarfsorientiert. Es erfolgt keine Lagerung auf dem Boden (Bodenabstand bei Regalen min. 30 cm und es wird das "First-in, first-out"-Prinzip beachtet. Eine ungeschützte Lagerung ist zu vermeiden

Sterilgut Lagerzeiten

Sterilgut muss vor Feuchtigkeit, Verschmutzung, extremen Temperaturunterschieden, mechanischer Beschädigung der Verpackung und UV-Strahlen geschützt werden. Die Lagerung von selbst verpacktem Sterilgut erfolgt entsprechend der nachfolgenden Verabredung.

Sterilgut-Lagerzeit

Verpackungsart	Lagerart	Lagerzeit
• Sterilisationsfolie 1-fach verpackt	im Schrank /Schublade oder Lagerkarton	6 Monate
• Sterilisationstüte 1-fach verpackt (aus Sterilisationspapier)	im Schrank /Schublade oder Lagerkarton	6 Monate
• Sterilisationstüte 2-fach verpackt	im Regal der Ambulanz (nur Verbandstoffe)	6 Monate
• Sterilisationsbogen + Tuch	im Schrank	1 Monat
• Container mit perforiertem Deckel und Dichtung	im Schrank /Containerwagen	6 Wochen