

Umgang mit Vaporisator

Vor dem Hantieren mit Milchpumpenansätzen + Säuglingsflaschen Händedesinfektion durchführen!

Milchpumpenansätze + Flaschen

1. Die gespülten Ansätze werden im VAPORISATOR mit 90 ml destilliertem Wasser desinfiziert. Dazu die gereinigten Flaschen und Milchpumpenansätze in den VAPORISATOR geben, keine Plastiklöffel.
2. Gerät anstellen (Dauer 15 min) und Schild (= „Vaporisiert“).
3. Vor dem Herausnehmen der Artikel Hände desinfizieren und Schutzhandschuhe anziehen.
4. Da die Artikel nach der Desinfektion feucht sind, auf ein frisches sauberes Abtrockentuch zum Trocknen stellen. Nach dem Trocknen in die aufbereiteten Behältnisse geben. Trockentuch jeweils erneuern.
5. Die sauberen Behältnisse mind. alle 7 Tage mit Alkohol 70 % (Terralin liquid) und sauberer Kompresse auswischen.
6. Den VAPORISATOR nach Benutzung mit 70 % Alkohol (Terralin liquid) innen auswischen und Einsatzkörbe entsprechend Markierung einsetzen.

Tägliche Aufbereitung der Milchpumpen mit Kompressor

Bei Benutzung des Geräts täglich

- die Schlauchverbindung zwischen Saugerflasche und Überlauf außen sowie
 - das Kompressorgehäuse
- mit sauberem frischen Lappen und 70 % Alkohol (Terralin liquid) desinfizieren.