

Umgang mit dem Vaporisator

Vor dem Hantieren mit dem Vaporisator Händedesinfektion durchführen!

Zum desinfizieren von z. B. Pari-Boy, Medikamentenvernebler, Verneblerflaschen für Sauerstoff, Verbandschere, Kocherklemme

1. Die gespülten Artikel werden im VAPORISATOR mit 90 ml destilliertem Wasser desinfiziert. Dazu die gereinigten Teile in den VAPORISATOR geben.
2. Gerät anstellen und Schild mit Dauer dazulegen (15 min).
3. Vor dem Herausnehmen der Artikel mit Klemme die Hände desinfizieren.
4. Da die Artikel nach der Desinfektion feucht sind, auf ein frisches sauberes Abtrockentuch zum Trocknen stellen; noch im selben Dienst weiter versorgen.
5. Den VAPORISATOR nach Benutzung mit 70 % Alkohol innen auswischen und Einsatzkörbe entsprechend Markierung einsetzen.