

- Eine **Trockenentsorgung der Spekula** in Gynäkologie und Geburtshilfe ist hygienisch in Ordnung, jedoch ästhetisch und geruchshygienisch oft ein Problem. Daher bitte ich um folgende Abhilfe:
- **Vollständiges Einlegen der Spekula** in eine **Gigasept Instru AF-Lösung 1,5%**, die **täglich erneuert** wird. Die desinfizierten Spekula mit dem Sieb aus dem Behälter nehmen, **reinigen und abspülen**. Zur zentralen Aufbereitung geben.

Nachfolgend die Dosierhinweise:

Dosiertabelle

Korrekte Dosierung von Desinfektionsmitteln

- ist praktizierter **Umweltschutz**,
- hilft **Krankenhausinfektionen zu reduzieren**,
- **erspart** uns unnötige **Kosten**.

Konzentration in % Liter-Lösung	1,5%
1 Liter	15 ml
2 Liter	30 ml
3 Liter	45 ml
4 Liter	60 ml
5 Liter	75 ml

Anwendungsbeispiel: Gebrauchsfüllung eines 5 Liter-Gefäßes (= 4 Liter) 1,5% Gigasept Instru AF = 60 ml Konzentrat.

Nachspülen mit klarem Wasser, Instrumente desinfiziert zur Zentralsterilisation geben.

Desinfektionsmittel **immer nur mit Handschuhen benutzen!**