

Desinfizierende Aufbereitung des TEE-Gerät (transoesophageale Echokardiografie)

- Das Gerät nach der Untersuchung mit einem weichen Tuch abwischen
- Einlegen für 30 min in GIGASEPT FF (neu) 4 %
- Den Handgriff mit Alkohol 70 % (Terralin liquid) abwischen

Dosiertabelle

Korrekte Dosierung von Desinfektionsmitteln

- ist praktizierter **Umweltschutz**,
- hilft **Krankenhausinfektionen zu reduzieren**,
- **erspart** uns unnötige **Kosten**.

Konzentr. in % Liter-Lösung	0,75%	1%	1,5%	4%
1 Liter	7,5 ml	10 ml	15 ml	40 ml
2 Liter	15 ml	20 ml	30 ml	80 ml
2,5 Liter				100 ml
3 Liter	22,5 ml	30 ml	45 ml	120 ml
4 Liter	30 ml	40 ml	60 ml	160 ml
5 Liter	37,5 ml	50 ml	75 ml	200 ml